



El paciente traga la cápsula NaviCam® SB.



A continuación, el paciente se va de la clínica con el cinturón corporal y el grabador de datos, y vuelve a la clínica después de unas 8 horas.



Una vez que se descargue y procese el estudio en la clínica, el médico lo revisará y determinará un diagnóstico y un plan para el paciente.

Una opción segura y sencilla para el examen del intestino delgado.

*¡No todos los sistemas de cápsula del intestino delgado son iguales!*

**PROSCAN**  
HERRAMIENTA DE LECTURA  
ASISTIDA POR IA

AnX Robotica es la primera empresa en combinar la inteligencia artificial con la endoscopia con cápsula del intestino delgado a través de su innovador software ProScan™. Esta combinación pone en manos de su médico el método más sofisticado para diagnosticar y tratar su afección gastrointestinal.

## ¿Es el procedimiento con NaviCam® SB adecuado para mí?

Si está embarazada, no puede tragar la cápsula NaviCam® SB o tiene una obstrucción conocida en el tubo digestivo, no debe someterse al procedimiento con NaviCam® SB. Informe a su médico sobre cualquier cirugía abdominal o enfermedad gastrointestinal conocida que haya tenido.

## ¿Cuáles son las posibles complicaciones?

Aunque son poco frecuentes, pueden ocurrir complicaciones, incluida la imposibilidad de excretar la cápsula. Póngase en contacto con su médico inmediatamente si tiene alguna molestia durante el procedimiento o después de su finalización.

### Datos de contacto

Distribuido por:  
AnX Robotica  
6010 W. Spring Creek Pkwy  
Plano, TX 75024  
855.777.0020 o 469.606.9495  
info@anxrobotics.com

LEA SIEMPRE LA ETIQUETA. USE SOLO COMO SE INDICA.  
SU PROFESIONAL DE LA SALUD LE ACONSEJARÁ SI ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA USTED.

MKT-0083, DAQR8Pv1

# NAVICAM® SB System

ENDOSCOPIA CON CÁPSULA DEL INTESTINO DELGADO

## Información para pacientes



**ANX**  
ROBOTICA



### ¿Qué es la endoscopia con cápsula del intestino delgado?

La tecnología de endoscopia con cápsula permite a su médico visualizar el intestino delgado en zonas a las que resulta difícil llegar mediante los procedimientos endoscópicos tradicionales.

La cápsula utilizada tiene el tamaño aproximado de un comprimido grande de vitaminas y puede tragarse fácilmente. La cápsula pasa por el tubo digestivo y obtiene miles de imágenes con una cámara en miniatura. Usted puede seguir con su rutina normal mientras se realiza el examen. Una vez que la cápsula atraviesa el tubo digestivo, el médico recupera las imágenes de la cápsula y las visualiza con un software especializado.

### ¿Por qué se realiza una endoscopia con cápsula?

La endoscopia con cápsula ayuda a su médico a ver el interior del intestino delgado para hacer un diagnóstico inicial de su afección, un seguimiento de otros procedimientos o una evaluación más detenida de su afección durante el tratamiento o después de su finalización.

### ¿Qué debo hacer el día antes del procedimiento?

Se le indicará que no coma alimentos sólidos durante al menos ocho horas antes del procedimiento. Durante las 8 horas de ayuno, puede beber líquidos transparentes para garantizar una mejor calidad de las imágenes, lo que permitirá un mejor diagnóstico. Su médico le dará instrucciones específicas sobre la preparación. Es importante que siga estas instrucciones para evitar repetir el procedimiento.

### ¿Qué debo hacer el día del procedimiento?

Después de seguir las instrucciones para la preparación, se le pondrá una faja y un grabador de datos NaviCam® SB. Su médico le explicará el procedimiento, revisará cualquier contraindicación y le indicará que trague la cápsula.

La sensación al tragar la cápsula es la misma que cuando ingiere una cápsula de vitaminas grande. No percibirá la cápsula mientras se desplaza por el tubo digestivo. Una vez que trague la cápsula, debe dejar de beber líquidos. A continuación, puede seguir con su rutina diaria dependiendo de su estado de salud y del consejo del médico. Después de dos horas, puede empezar a beber líquidos transparentes de nuevo y, después de cuatro horas, se permite un tentempié ligero. Su médico le dará instrucciones específicas para que siga ese tiempo. Mientras la cápsula esté en su cuerpo, no podrá someterse a una RM ni estar cerca de una máquina de RM. Su médico le explicará todas y cada una de las restricciones.

### ¿Cuáles son los componentes de la NaviCam® SB?

#### Cápsula del intestino delgado

La cápsula ingerible es una cámara de video del tamaño de una pastilla que se traga con agua antes de iniciarse el examen. Dentro de la cápsula hay una cámara diminuta con una fuente de luz, la cual capta continuamente imágenes del intestino delgado.

#### Grabador de datos

El grabador de datos se lleva sobre la ropa para el examen, y recibe las imágenes del interior del intestino delgado que capta la cápsula durante el examen.



### ¿Qué hace el médico tras mi regreso a la clínica?

La cápsula NaviCam® SB toma miles de imágenes de alta resolución al pasar por el tubo digestivo. Mediante el uso de equipos especiales, su médico transfiere esas imágenes a una computadora.

La aplicación de software patentada convierte las imágenes a formato de vídeo, lo que permite al médico examinar cuidadosamente y diagnosticar las anomalías del intestino delgado. Luego, el médico compilará un informe de los hallazgos y comentará los resultados con usted, además de los siguientes pasos en su diagnóstico y tratamiento.